



KENKO MEDICARE S.A.S.

Bienestar y Salud en Movimiento...

FICHA TÉCNICA

TUBO AL VACÍO TAPA AMARILLA CON GEL 5ml

Marca:	SOLU LAB
Producto:	<i>Tubo para extracción de Sangre, Está recubierto de silicona y contiene minúsculas partículas de sílice que aceleran la coagulación de la sangre. En el interior del tubo en la parte inferior contiene un gel separador (mezcla de siliconas y aceites vegetales) el cual, produce un tapón biológico que separa la muestra en tres capas; suero-gel-coágulo de esta forma es posible obtener una muestra de suero de alta calidad para los laboratorios clínicos.</i>
Componentes:	<u>Tubo PET: Politereftalato de Etileno.</u> <u>Tapa Antideslizante De Seguridad Color Amarillo: Polietileno</u> <u>Tapón: Goma de Butilo</u> <u>Gel Separador.</u>
Registro Sanitario:	INVIMA: 2018DM-0017733
Código:	1000050030
Volumen	5 ml
Tamaño:	13 mm x 100 mm
Empaque:	Gradilla x 100 Tubos; Cartón por 12 y 18 Gradillas
Manejo:	Centrifugar por 10 a 15 minutos de 3000 a 3800 rpm.
Vida útil del Producto:	24 Meses.
Almacenar:	<i>A temperatura ambiente, no almacenar, ni transportar con sustancias que liberen gases o vapores, evitar exposición directa al sol y a excesos de humedad.</i>

KENKO MEDICARE S.A.S.

Tel: 3176687701

4327887 - 4048797